

Instrukcja Przedlaboratoryjna	WIF LKJL Rzeszów
INSTRUKCJA LKJL/IPL/03	Strona:1 /2
Tytuł: Kontrola skuteczności sterylizacji parą wodną za pomocą wskaźnika Attest 1262	Edycja 02/Egz....
	Data wyd.:9.02.2015

Cel:

Ocena skuteczności sterylizacji parą wodną w autoklawie za pomocą wskaźnika biologicznego Attest 1262.

Metoda postępowania:

Nie używać wskaźników po dacie ważności i przechowywać wg zaleceń producenta.

1. Opisać wskaźnik podając na nalepce datę sterylizacji, nr autoklawu, nr ładunku.
2. Umieścić wskaźnik – fiolkę w pakiecie testowym, reprezentatywnym dla całego załadunku sterylizatora, w miejscu najtrudniejszym do penetracji przez parę (na dnie, przy drzwiczkach).
3. Przeprowadzić cykl sterylizacji dobierając odpowiednie parametry procesu , najczęściej zalecane: temperatura 121°C, nadciśnienie 0,1 MPa, czas 15 min.

Jeżeli parametry cyklu zostały spełnione, paskowy wskaźnik chemiczny na nalepce zmienia barwę z różowej na ciemnobrązową.

4. Po zakończeniu sterylizacji wyjąć z autoklawu pakiet testowy ze wskaźnikiem. Odczekać 10 min. w celu wystudzenia fiolki i zabezpieczyć ją z zewnątrz na czas transportu. Dodatkowo dołączyć drugi wskaźnik tzw. „0”, nie poddany autoklawowaniu.
5. Wskaźniki Attest z wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.

Opracował: Stanowisko: K-k LKJL Nazwisko: R. Rokita Data: 9.02.2015 Podpis:	Sprawdził: Stanowisko: K-k LKJL Nazwisko: R. Rokita Data : 9.02.2015 Podpis:	Zatwierdził: Stanowisko: K-k LKJL Nazwisko: R. Rokita Data : 9.02.2015 Podpis:
--	---	---

Instrukcja Przedlaboratoryjna	WIF LKJL Rzeszów
INSTRUKCJA LKJL/IPL/03	Strona:2 /2
Tytuł: Kontrola skuteczności sterylizacji parą wodną za pomocą wskaźnika Attest 1262	Edycja 02/Egz...
	Data wyd.:9.02.2015

6. Załączniki:

Załącznik 1 Formularz LKJL/IPL/02/F01 Ed.2. z dn. 27.11.2008 – Zlecenie wykonania analizy skuteczności sterylizacji.

Załącznik 2. Formularz LKJL/IPL/02/F02 Ed.4. z dn. 18.02.2009 – Orzeczenie o wyniku badań jakościowych próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzanej przez inspektora – Ocena skuteczności sterylizacji.

Załącznik 3. Formularz LKJL/IPL/02/F03 Ed.4. z dn. 18.02.2009 – Orzeczenie o wyniku badań oceny skuteczności sterylizacji.