

Instrukcja kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem z użyciem krążków Sporalu S.

1. Wypełnić równomiernie komorę sterylizatora wsadem zachowując wymaganą odległość 5 cm od ścian bocznych i drzwiczek oraz 1 cm między pakietami.

W suszarkach używanych jako sterylizatory, przed rozpoczęciem procesu, zamknąć i uszczelnić kominiek wentylacyjny. Wyjławiane materiały powinny być suche.

2. Wyjąć z aluminiowej torebki zabezpieczone bibułką 3 krążki Sporali S i odpowiednio oznaczyć. Nie zdejmując bibułek umieścić w szklanych naczyniach (jeden krążek w jednym naczyniu).

Przykładowe oznakowanie:

G – półka górna,

Ś – półka środkowa,

D – półka dolna,

0 – kontrolny krążek Sporalu S (nie poddany sterylizacji).

3. Naczynia z krążkami Sporalu S umieścić na półkach w urządzeniu sterylizującym. Na każdej z półek można umieścić więcej naczyń z krążkami Sporalu S, ustawiając je w różnych miejscach.

Nie używać wskaźników po dacie ważności. Przechowywać wg zaleceń producenta.

4. Przeprowadzić sterylizację stosując odpowiednie parametry procesu:
 - wg wymagań aktualnej FP - minimalna temperatura 160°C utrzymywana co najmniej przez 2 godziny,
 - wg zaleceń podanych w instrukcji producenta urządzenia,
 - wg innej metody gwarantując zapewnienie poziomu jałowości $SAL \leq 10^{-6}$.

W urządzeniach bez monitoringu parametrów procesu, w celu stabilizacji temperatury wsadu, odliczanie czasu ekspozycji rozpocząć po 15 minutach od osiągnięcia zadanej temperatury. W trakcie cyklu nie wolno ani na chwilę otwierać drzwiczek komory.

5. Po zakończeniu procesu sterylizacji krążki Sporalu S zapakować np. do foliowych torebek, tak, aby ochronić je przed wilgocią. Następnie zapakować w kopertę. Dodatkowo dołączyć czwarty krążek tzw. „0”, nie poddany sterylizacji.

6. Kopertę ze Sporalami S i wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć osobiście do LKJL WIF w Rzeszowie w ciągu 24 godzin (nie później niż do godz. 13-tej danego dnia) lub przesać pocztą (przesyłką priorytetową lub kurierską).

Wskaźniki ze spalonymi bibułkami ochronnymi nie będą przyjmowane do badania.

Steryлизację każdorazowo rozpoczynać od wystudzenia komory.