

Instrukcja kontroli procesu sterylizacji parą wodną z użyciem wskaźnika ampulkowego.

1. Opisać wskaźnik podając na naklejce:

- datę sterylizacji,
- nr autoklawu,
- nr ładunku.

Nie używać wskaźników po dacie ważności. Przechowywać wg zaleceń producenta.

2. Umieścić wskaźnik – fiolkę w pakiecie testowym, reprezentatywnym dla całego załadunku sterylizatora, w miejscu najtrudniejszym do penetracji przez parę (na dnie, przy drzwiczkach).

3. Przeprowadzić cykl sterylizacji dobierając odpowiednie parametry procesu:

- wg wymagań aktualnej FP - minimum 120°C przez 15 min lub dłużej,
- wg zaleceń podanych w instrukcji producenta urządzenia,
- wg innej metody.

4. Po zakończeniu sterylizacji wyjąć z autoklawu pakiet testowy ze wskaźnikiem. Odczekać 10 min. w celu wystudzenia fiolki i zabezpieczyć ją z zewnątrz na czas transportu. Dodatkowo dołączyć drugi wskaźnik tzw. „0”, nie poddany sterylizacji.

5. Wskaźniki z wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.